



# STATION DE LAVAGE

## FICHE TECHNIQUE – OCULAIRE PLUM SAFETY

**Référence :** Station murale de premiers secours – Lavage oculaire

**Modèle :** Plum Safety 0,9% Sodium Chloride

**Contenu :** 2 flacons de 500 ml de solution stérile (chlorure de sodium 0,9%)

**pH :** Neutre (solution isotonique, adaptée au lavage oculaire en cas de contact avec des corps étrangers ou substances non corrosives)

### Objectif :

Rincer immédiatement les yeux ou la peau en cas de projection de corps étranger, poussière, ou produit chimique non corrosif.

### Procédure :

1. Saisir le flacon et retirer le bouchon de protection.
2. Incliner la tête en arrière ou sur le côté selon l'œil atteint.
3. Appliquer l'embout ergonomique au niveau de l'œil.
4. Presser doucement le flacon pour libérer la solution.
5. Rincer pendant au moins 2 minutes (15 minutes en cas de produits agressifs).
6. Consulter un médecin après usage.



### Informations techniques :

- Installation murale à 145 cm du sol.
- Coffret vert rigide avec couvercle protecteur.
- Solution stérile à usage unique, à remplacer après ouverture.
- Durée de conservation : jusqu'à la date de péremption indiquée.
- Inclus : miroir intégré pour l'auto-application + pictogrammes d'utilisation normalisée.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.
- Remplacer immédiatement après usage ou si la date de péremption est dépassée.
- Conserver à température ambiante (15–25°C).
- Vérifier régulièrement l'état des flacons et de la fixation murale.

**Attention :** En cas de projection d'acide fluorhydrique (HF), utiliser une solution spécifique (non incluse ici).